


PRECI-CLIX-MATRIZEN/PRECI-CLIX MATRICES/MATRICES PRECI-CLIX

PRECI-CLIX-Werkzeug/ PRECI-CLIX-Tool/ Outil PRECI-CLIX (Art.-Nr.: 3145)

- a. Wechselspitze/ change tip/ change point
- b. Griffstück/ Handle/ Poignée
- c. Werkzeugende zum Einsetzen der Matrize/ Tool part for setting the matrix/ Partie de l'outil pour mettre en place la matrice
- d. Werkzeugende zum Entfernen der Matrize/ Tool part for removing the matrix/ Partie de l'outil pour enlever la matrice

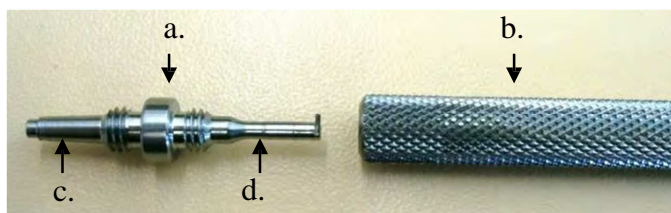

1. Matrizen eindrücken/ Setting Matrices/ Déprimer des matrices



Legen Sie das Gehäuse auf eine ebene Fläche. Setzen Sie die Kunststoffmatrize auf das Eindrückwerkzeug und drücken Sie sie in das Gehäuse.

Place the case on an even surface. Set the plastic matrix on the insertion tool and press the matrix into the case.

Mettez la caisse sur une surface plane. Mettez la matrice en plastique sur l'outil d'insertion et pressez la matrice dans la caisse.

- Weiße Matrizen, Abzugskraft ca. 600 g./ White Matrices, retention about 600 g.
Les matrices blanches, rétention environ 600 g
- Gelbe Matrizen, Abzugskraft ca. 800 g./ Yellow Matrices, retention about 800 g.
Les matrices jaunes, rétention environ 800 g.
- Rote Matrizen, Abzugskraft ca. 1000 g./ Red Matrices, retention about 1000 g.
Les matrices rouges, rétention environ 1000 g

2. Matrizen polymerisieren/ Polymerizing Matrices/ Polymérisation des matrices



Legen Sie einen Platzhalter über das Laboranalog. Drücken Sie die Matrize darüber. Blocken Sie die darunter liegenden Bereiche aus.

Polymerisieren Sie die Prothese über die Matrizen.

Set a placeholder on the Laboratory Analog. Place the matrix over it. Block out the areas underneath. Polymerize the Prosthesis over the matrices.

Mettez un support sur l'analogue de laboratoire Placer la matrice dessus. Bloquer les parties en dessous. Polymériser la prothèse au-

dessus des matrices.

3. Matrizen austauschen/ Replacing Matrices/ Remplacement des matrices



Erhitzen Sie das Entfernungstool. Drücken Sie es mit der Spitze in die Kunststoffmatrize. Hebeln Sie die Kunststoffmatrize aus dem Gehäuse. (ggb. Vorgänge wiederholen)

Heat the removal tool. With the piece, press the tool into the plastic matrix. Remove the plastic matrix from the case. (eventually repeat procedures)

Chauffer l'outil d'extraction. Avec la pièce, mettre l'outil dans la matrice en plastique. Enlever la matrice en plastique de la caisse. (éventuellement, répéter les procédés)